

Volkswagen Caddy Maxi API

Vozidlo pro přepravu osob na invalidním vozíku

NÁVOD K OBSLUZE



1. ÚVOD

Před použitím výrobku je nutné tento návod k obsluze pročíst a dobře mu porozumět. Uložte návod na lehce přístupném místě pro pozdější použití. Automobil Volkswagen Caddy API umožňuje snadnou přepravu osob na invalidním vozíku.

Celý systém byl podroben bezpečnostním zkouškám. Pokud je systém upraven, přestaven nebo používán jiným způsobem než je určeno, API CZ s.r.o. nenesе žádnou zodpovědnost za případné škody nebo zranění osob.

Výrobek při doručení pečlivě zkontrolujte, okamžitě reklamujte poškození vzniklá při přepravě výrobku.

2. OBSAH

1. ÚVOD	2
2. OBSAH	2
3. POPIS	2
4. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA	3
5. POSTUP PŘI NAKLÁDÁNÍ OSOBY NA INVALIDNÍM VOZÍKU	3
5.1. Vyklopení nájezdové rampy	3
5.2. Přizpůsobení vnitřního prostoru	4
5.3. Před najetím do vozu	4
6. UPOUTÁNÍ INVALIDNÍHO VOZÍKU VE VOZIDLE	5
7. PŘIPOUTÁNÍ PŘEVÁŽENÉ OSOBY NA INVALIDNÍM VOZÍKU	6
8. OPRAVY A ÚDRŽBA	7
9. TECHNICKÉ ÚDAJE	7
10. NÁHRADNÍ DÍLY	7

3. POPIS

Automobil Volkswagen Caddy API se sníženou podlahou slouží k přepravě těžce tělesně postižené osoby na invalidním vozíku. Vozidlo je vybaveno snadno ovladatelnou výklopnou rampou. Vyklopením rampy ven z vozidla je umožněn bezproblémový přístup do vozu. V automobilu je vozík s přepravovanou osobou upevněn čtyřmi samonavíjecími pásy se zpětnou aretací, které jsou uchyceny k podlaze vozu. Osoba je připoutána samostatně bezpečnostním pásem. Takto upravený automobil zajišťuje snadný přístup a vysokou úroveň bezpečnosti při přepravě tělesně postižené osoby na vozíku. Při přepravě osoby na invalidním vozíku je rampa ve svislé poloze za zadními dveřmi. Pokud nebudete převážet osobu na invalidním vozíku, lze rampu sklopit na úroveň podlahy a tím zpřístupnit celý zavazadlový prostor vozidla.

4. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA



K zajištění bezpečného převozu se vždy ujistěte, zda je přepravovaná osoba připoutána bezpečnostním pásem a invalidní vozík řádně upevněn. Při najíždění invalidním vozíkem na rampu se ujistěte, že je rampa dobře aretována.

5. POSTUP PŘI NAKLÁDÁNÍ OSOBY NA INVALIDNÍM VOZÍKU

5.1. Vyklopení nájezdové rampy

obr. 1



Zatáhněte za rampu umístěnou na podlaze až ji dostanete do svislé polohy.

obr. 2



Ve svislé poloze musí rampa sjet o cca 10 mm dolů (červená šipka). V této poloze je rampa aretována proti sklopení. Posuňte otevírací páku doprava (bílá šipka). Tím se uvolní celá rampa pro vyklopení z vozidla

obr. 3

Rampu vyklopte z vozidla.



Pro složení rampy zpět na podlahu vozu rampu nejdříve vytáhnete o cca 10 mm nahoru (bílá šipka) a ve vytaženém stavu na rampu zatlačte dopředu (červená šipka). Položte rampu na podlahu až zapadne do držáků.



5.2. Přizpůsobení vnitřního prostoru

obr. 4



Vyklopte přední kryt podlahy aby jste získali místo pro invalidní vozík.

5.3. Před najetím do vozu

obr. 5



Pod sedačkou jsou umístěny dva samonavíjecí pásy. Než najedete do vozu, vytáhnete tyto pásy ven a uchytíte je za rám invalidního vozíku.

obr. 6



Pásy jsou jištěny aretací. Před vytažením zapnete vypínač aretace umístěný na pravé straně vozidla. Rozsvítí se kontrolka vypínače. Tím jsou pásy uvolněny pro vytažení.

obr. 7



Vytáhnete pásy ven z vozidla a upevníte je za rám v přední části invalidního vozíku. Přepnete vypínač aretace pásu (kontrolka zhasne). Najedte s vozíkem do auta. Pásy se při najíždění navíjejí a zabraňují zpětnému pohybu invalidního vozíku. Při vyjíždění s vozíkem z vozidla přepnete vypínač aretace pásu (kontrolka svítí). Tím jsou přední samonavíjecí pásy uvolněny a umožňují vyjet s vozíkem ven z vozidla.

UPOZORNĚNÍ: Při zaparkování vozidla se vždy ujistěte, že kontrolka aretace pásu nesvítí. Zabráňte tím nechtěnému vybití baterie vozidla.



Nikdy nepřipevňujte pásy za stupačky invalidního vozíku.

6. UPOUTÁNÍ INVALIDNÍHO VOZÍKU VE VOZIDLE

obr. 8



Upevněte zadní samonavíjecí pásy do úchyty na podlaze vozu ve směru šipky.

obr. 9




Upevněný pás vytáhněte a přichyťte za rám vozíku.

obr. 10



Pro odepnutí pásu z vozíku je nutné uvolnit červenou pojistku aretace.

obr. 11

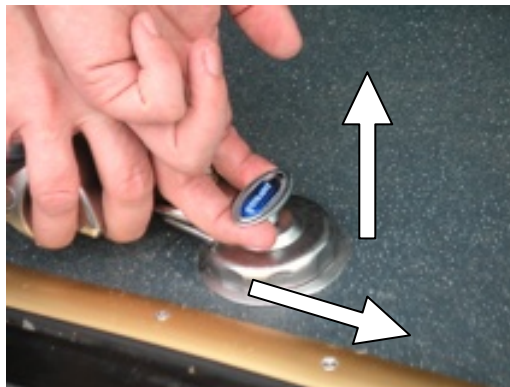

Demontáž se provádí povytažením aretace a vysunutím z úchyty v podlaze vozu.

7. PŘIPOUTÁNÍ PŘEVÁŽENÉ OSOBY NA INVALIDNÍM VOZÍKU

Pro upoutání převážené osoby slouží ramenní břišní pás. Spodní konec břišního pásu upevněte na západku u zadního samonavíjecího pásu (obr.12). Do přezky břišního pásu zacvakněte ramenní pás (obr.13).

obr. 12



Detail upoutání břišního pásu.

obr. 13



Detail spojení ramenního a břišního pásu

obr. 14

Připoutejte osobu na vozíku ramením bezpečnostním pásem.
Zaklopte plošinu zpět do vozu



8. OPRAVY A ÚDRŽBA

Opravy závad vzniklých na úpravě Volkswagen Caddy API mohou provádět pouze autorizovaná pracoviště.

Udržujte v čistotě zámky zadních rychloupínacích pásu a zámek plošiny.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Ukazatel stavu paliva

Objem nové nádrže je 53l, rezervní zásoba paliva je 10l.

Upozornění:

Co dělat v případě nepřesného ukazování stavu paliva:

Ukazatel paliva se nastavuje podle polohy plováku v nádrži v okamžiku zapnutí zapalování. Další pohyb ukazatele je řízen pouze podle údajů vstřikovačů paliva v motoru a už není ovlivněn polohou plováku v nádrži. V případě, že zaparkujete s vozidlem na nakloněné rovině, dojde k přemístění paliva v nádrži a tím i ke změně polohy plováku. Toto může zapříčinit nastavení ukazatele paliva do špatné polohy. Pro získání správné aktuální polohy ukazatele paliva zaparkujte vozidlo na rovině. Vypněte zapalování a počkejte cca 30 sec až se vypne elektronika vozidla (zhasne displej na přístrojové desce). Zapněte zapalování a ukazatel paliva se znovu nastaví do polohy odpovídající poloze plováku v nádrži.

10. NÁHRADNÍ DÍLY

Náhradní díly dodává výhradně firma API CZ s.r.o.

Kotvení invalidního vozíku

Celý systém upoutání osoby na invalidním vozíku byl podroben bariérovým zkouškám při 50 km/h a zpomalení 20g, které prokázali vysokou úroveň bezpečnost celého systému.

Výrobní číslo:

Vyrábí a dodává:

API CZ s.r.o, Slapy 106, 391 76 Slapy u Tábora, tel/fax: 381 278 043

www.apicz.com

Veškeré informace uvedené v tomto návodu k obsluze jsou platné v době tisku. API CZ s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění.



API CZ s.r.o
Slapy 106
391 76 Slapy u Tábora
tel./fax: 381 278043
e-mail: API@seznam.cz
www.apicz.com

Záruční list

Záruční podmínky:

- Na výrobek je poskytována záruka shodná se zárukou Peugeot na vozidlo, při splnění záručních podmínek Peugeot.
- Záruka se vztahuje na mechanické části výrobku a na jeho funkčnost.
- Záruka se nevztahuje na vady a chyby funkčnosti způsobené neodbornou montáží, neodbornou úpravou či opravou výrobku, poškozením výrobku v důsledku havárie a na vady způsobené nesprávným používáním výrobku.
- Každých 30 000 km nebo každé 2 roky je nutné provést kontrolu vozidla.
- V případě, že je záruka uznána a záruční vada je odstranitelná, nemůže být požadována výměna výrobku.
- Do záruky není zahrnuto dopravné, tyto náklady hradí zákazník vždy sám.
- API neručí za přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku havárie vozidla nebo poruchy namontovaného výrobku.
- Uplatněním práva ze záruky nezaniká povinnost zaplacení kupní ceny výrobku, a to ani v případě, že toto právo bylo uznáno.

Datum: