
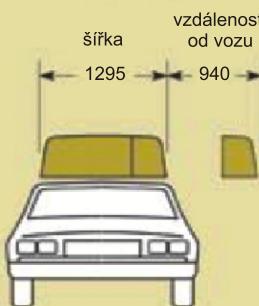


Chair Topper

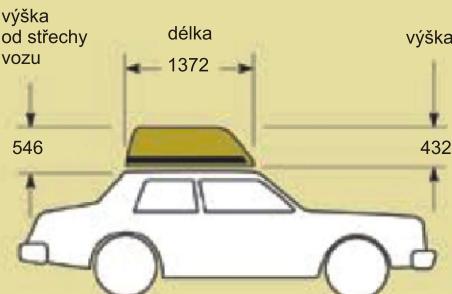

Chair Topper střešní box na vozík

Osoba na invalidním vozíku se přesune na sedadlo řidiče nebo spolujezdce.

Pomocí tlačítka na ovladači rozevřeme střešní box a spustíme hák do výšky invalidního vozíku.

Hák se umístní pod sedačku vozíku. Zvednutím háku se invalidní vozík složí a zasune do střešního boxu.

Zvedat je možné standardní skládací vozíky do hmotnosti cca 20kg.

Doba zvedání je 30s.

Váha zařízení je 55kg.


Střešní box má malé nároky na prostor, proto ho lze používat i v těsných prostorách garáže.

Při potížích je možné střešní box otevřít manuálně.



Plastový kryt pevně uzavře invalidní vozík

Box se pomocí bezpečnostních úchytů připevní na střešní nosič

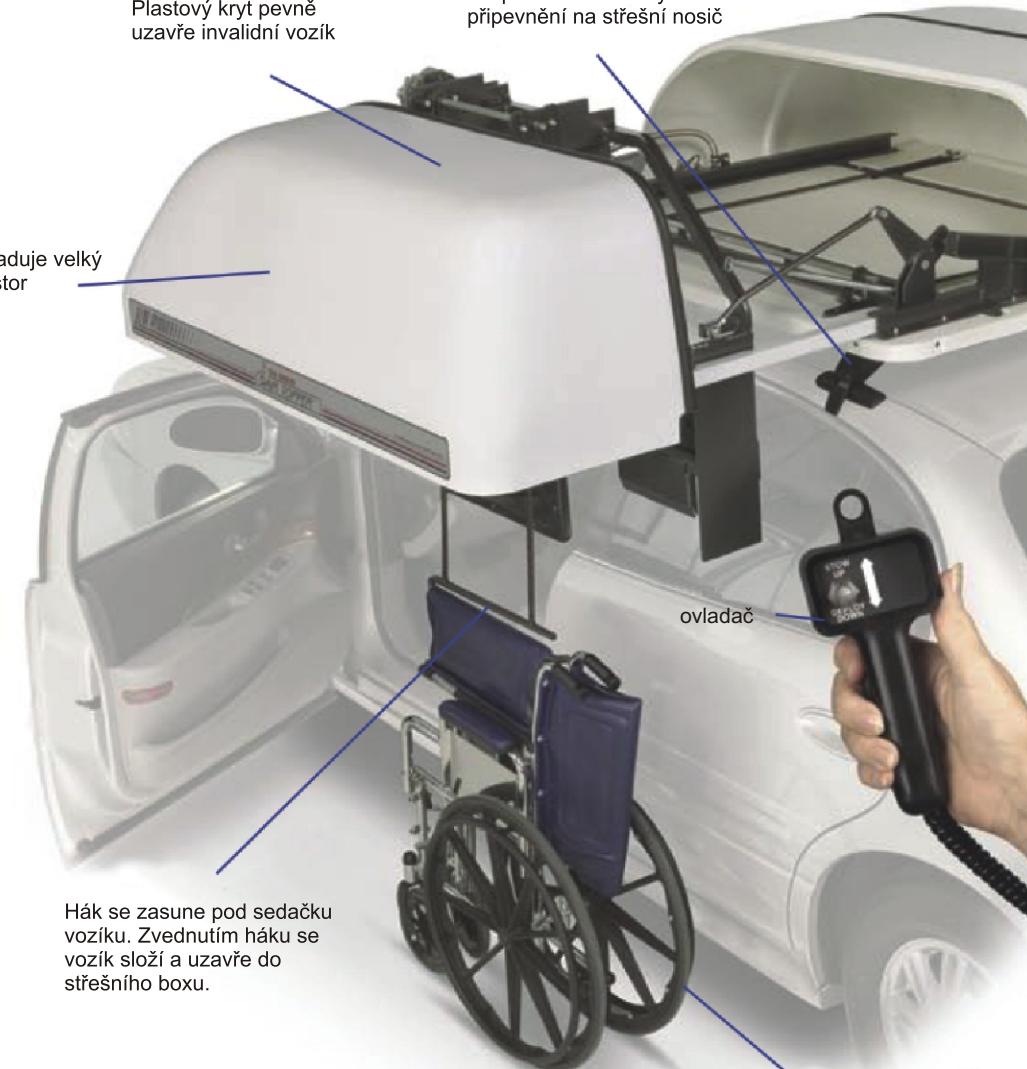

Standardní skládací vozík jehož váha není větší než 20 kg.